

CRYOLIPOLYSE

- 01 CRYOLIPOLYSE par plaques PELTIER 1 à 8 zones
 - 02 Electroporation
-



Médecin M PLAQUE



La cryolipolyse par plaques PELTIER est une méthode révolutionnaire, indolore et non invasive pour réduire la cellulite et éliminer les graisses localisées.

Cette technique d'amincissement cible spécifiquement les amas graisseux indésirables sans nécessiter de chirurgie.

Les cellules adipeuses sont refroidies jusqu'à leur destruction naturelle, suivie d'une élimination par le corps.

En somme, la cryolipolyse par plaques permet une réduction efficace de la graisse corporelle sans recourir à la liposuction.

Mode opératoire


- Refroidissement des amas graisseux ciblés par cryo-cristallisation.
- Les cellules adipeuses subissent une mort biologique (apoptose).
- Les cellules adipeuses sont éliminées entre 4 et 6 semaines par les voies naturelles.



Amincissement jusqu'à 6.8 cm

LES FONCTIONS Applications

- Trois actions simultanées avec 1 à 8 plaques PELTIER en même temps.

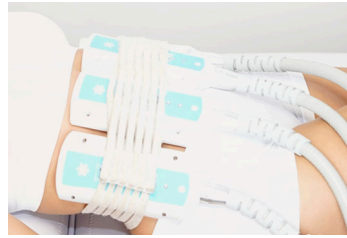


Réduction des amas graisseux en moyenne de 30% par séance

Les zones de traitement recommandées comprennent:

- l'abdomen,
- les "poignées d'amour",
- l'intérieur et l'extérieur des cuisses, l'intérieur et l'extérieur des genoux,
- les bras,
- les bourrelets du dos
- et le bas des fesses.

CAVITATION

Les ultrasons de basses fréquences émis vont créer des micro-bulles d'air au sein des cellules graisseuses.

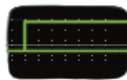

L'onde L, est une technologie qui permet de stimuler la circulation des fluides organiques et de favoriser la régénération des cellules en accélérant leur métabolisme.



Les ondes M, stimulent les contractions musculaires, ce qui contribue à renforcer et raffermir la peau.



Les ondes Z, améliorent la circulation lymphatique pour drainer les fluides et les toxines, et elles contribuent également à la régénération des fibres musculaires en favorisant leur oxygénation.

Trois actions simultanées de la cryolipolyse par plaque :

1. Réduction des graisses : Les plaques de cryolipolyse sont placées sur les zones du corps où il y a des amas graisseux. Les plaques vont ensuite refroidir les cellules graisseuses sous la peau à une température contrôlée et constante. Cela entraîne la mort des cellules graisseuses, qui sont ensuite éliminées naturellement par l'organisme en quelques semaines.
2. Raffermissment de la peau : En plus de réduire les graisses, la cryolipolyse par plaque contribue à raffermir la peau. Le refroidissement de la peau peut stimuler la production de collagène et d'élastine, ce qui peut améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau.
3. Drainage lymphatique : La cryolipolyse par plaque aide à améliorer la circulation lymphatique. Le refroidissement de la peau peut favoriser la circulation des fluides corporels, ce qui peut aider à drainer les toxines et les déchets des tissus et des organes. Cela peut également contribuer à réduire la rétention d'eau et à améliorer l'apparence de la peau.

ELECTROPORATION

Le système d'électroporation offre une bio-stimulation par impulsions électriques en imitant le processus bio-électrique du corps pour provoquer des contractions musculaires.

Il permet d'augmenter la circulation veineuse et lymphatique et améliore le métabolisme.

Simultanément, il permet d'ouvrir les pores de la peau pour une diffusion du froid en profondeur.



DISPOSITIF MÉDICAL


NORME 2017/745 UE

DONNÉES TECHNIQUES

protocole

Caractéristiques techniques :

- Traitement par zone : de 1 à 8 zones en une session
- Zones de traitement recommandées : abdomen, poignées d'amour, parties intérieures et extérieures des cuisses
- Temps de traitement : de 20 à 45 minutes par zone et par session
- Température de traitement : entre -10°C et +45°C en fonction du calibre de la peau
- Nombre total de traitements : de 3 à 5 sessions pour la même zone
- Temps d'attente entre les sessions sur la même zone de traitement : de 4 à 8 semaines.
- Fréquences EMS : 4000Hz
- Puissance d'entrée : 220 ~ 240V, 50/60Hz
- Nombre de poignées : 8 plaques PELTIER

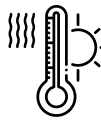

Variation de température

- +45°C à -10°C.

Durée du traitement

- 20 à 45 minutes par séance.
- 1 fois par mois.
- Nécessite environ 5 séances.



Protocole de soins possible (*):

1. Évaluation du patient pour déterminer les zones de traitement et l'épaisseur minimale de la couche adipeuse : 10 mm.
2. Préparation de la zone de traitement (nettoyage, séchage).
3. Application de membranes de protection contre le froid, imbibées de gel.
4. Application des plaques peltier de l'appareil sur la zone de traitement, en fonction du nombre de zones à traiter et du calibre de la peau.
5. Réglage de la température de traitement en fonction du calibre de la peau et de l'épaisseur de la couche adipeuse (entre -10 et -45°C).
6. Lancement de la séance de traitement avec une durée de 20 à 45 minutes par zone, en fonction de la tolérance du patient.
7. Répéter la séance de traitement dans la même zone 3 à 5 fois, en laissant un intervalle de 4 à 8 semaines entre les séances.
8. Suivi post-traitement pour surveiller les résultats et recommander un plan d'entretien.
9. Proposer un complément avec le Medic M Body Shape entre les séances.

(*) Il est important de noter que ce protocole est uniquement indicatif et que les réglages précis de l'appareil doivent être adaptés aux besoins et aux caractéristiques de chaque patient. Il est également essentiel que les soins soient effectués par un professionnel formé et qualifié, respectant l'utilisation d'appareils sous la norme CE MÉDICAL.

Les bonnes pratiques, la découverte des contre indications, la mise en place de protocoles adaptés et l'utilisation de la machine dans les règles de l'art, sont uniquement de la responsabilité du praticien.

Nous déclinons ainsi toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de non respect des protocoles applicables, et ne serions être tenu pour responsable des dommages ou préjudices qui pourraient en découler.

Réduction des amas graisseux en moyenne de 30% par séance, soit un potentiel de 1000€ à 2000€ TTC, par patient et par zone.

La machine est financée en facturant 3 à 4 séances par mois.



DISPOSITIF MÉDICAL

NORME 2017/745 UE

NORME 2014/35 UE

MÉDIC M ESSENTIEL
Médecine esthétique



MÉDIC M ESSENTIEL

Contactez-nous



contact@medicmessentiel.com

06.46.41.12.74

contact@medimessentiel.com