

- 01 PALPER-ROULER
  - 02 RADIO FRÉQUENCE
  - 03 CAVITATION 4C ET LIPO LASER
- 



BODYSHAPE



# *Medic M* BODY SHAPE

Découvrez notre solution esthétique complète pour des traitements du visage et du corps ! Notre appareil BodyShape est équipé de 6 applicateurs différents pour répondre aux besoins de vos patients.

2 applicateurs de palpé roulé, avec une tête large et une tête moyenne, utilisent le mode Roll in & Roll out et Roll up & Roll down pour cibler efficacement les zones à problèmes et améliorer la circulation sanguine pour une peau plus lisse et plus ferme.

3 applicateurs utilisent la technologie de Lipo-Laser, de radiofréquence et de vacuum, qui fonctionnent simultanément pour des résultats encore plus rapides et efficaces.

1 applicateur de cavitation 4C cible la graisse profonde pour des résultats visibles en seulement 30 minutes de traitement.

Que vous cherchiez à éliminer la graisse tenace, à sculpter votre corps ou à tonifier votre peau, notre solution esthétique complète, offre une gamme de traitements personnalisés pour répondre à vos besoins.

Un excellent complément au traitement par cryolipolyse.



*Déloge les amas graisseux compactes  
et atténue l'effet peau d'orange.*

# LES ACCESSOIRES *applicateurs*

- Nos 6 applicateurs vous permettent de personnaliser entièrement vos soins.



L'applicateur LShape est utilisé pour les grandes zones telles que les cuisses, les fesses, l'abdomen ou le dos. L'applicateur MShape est utilisé pour les petites zones telles que les flancs, les mollets et les bras, ainsi que pour renforcer les résultats obtenus avec l'applicateur LShape.

Les quatre modes de fonctionnement des rouleaux sont les suivants :



Lipo In - Mobilisation intense pour la cellulite et les graisses tenaces



Lipo Out - Stimulation contrôlée et spécifique de la peau relâchée et de la cellulite.



Lipo Up/Down - Remodelage de la silhouette pour un contour du corps amélioré.



L'applicateur FaceShape est utilisé pour le contour du cou et du visage, ainsi que pour le lifting, le raffermissment de la peau, et le traitement des rides et ridules.

La combinaison synergique d'énergies :

- Le lipo laser de 650 nm chauffe la peau et les tissus adipeux jusqu'à 13 mm de profondeur.
- La radiofréquence bipolaire (RF) chauffe la peau et les tissus adipeux de 5 à 15 mm de profondeur.
- Le vide assure une distribution précise de l'énergie.
- La manipulation mécanique améliore le drainage lymphatique et la réduction de la cellulite.



La cavitation 4C est une technologie non-invasive qui utilise des ondes sonores de haute fréquence pour éliminer la graisse profonde dans le corps. Cette technologie est améliorée par rapport à la cavitation traditionnelle grâce à l'utilisation de quatre transducteurs intégrés dans un seul applicateur, offrant ainsi des résultats plus efficaces en moins de temps.

Elle est souvent utilisée en combinaison avec d'autres traitements pour éliminer la graisse tenace dans des zones telles que l'abdomen, les cuisses, les fesses, les bras et le dos.



**NORME 2017/745 UE**  
**NORME 2014/35 UE**

# LES FONCTIONS

*Applications*

- 6 applicateurs pour des soins personnalisés.



*Résultat visibles en 30mn*


#### Les zones de traitement recommandées :

- Visage et cou pour le raffermissement, le lifting et le lissage des rides et ridules avec l'applicateur VFace.
- Zones larges telles que les cuisses, les fesses, l'abdomen ou le dos avec l'applicateur LShape.
- Zones plus petites comme les flancs, les mollets et les bras avec l'applicateur MShape.
- La cellulite et les graisses tenaces sur l'ensemble du corps avec la cavitation 4C, le système de rollers Shape-RF Vacuum, ainsi que la combinaison de lipo laser et de radiofréquence dans l'appareil -SHAPE.
- Les zones où la peau est relâchée et la cellulite avec l'utilisation des rollers en mode Lipo In, Lipo Out et Lipo up/down.


Notre FaceShape offre une efficacité supérieure grâce à une montée rapide en température jusqu'à 42 °C en seulement 1 minute, grâce à une puissance de 150W de radiofréquence (RF) et de 20W de lipo laser pour une diffusion constante de l'énergie, ce qui permet de maintenir la température cible tout au long du traitement.

Les résultats obtenus avec notre technologie sont les suivants : une peau plus ferme grâce à la stimulation de la production de collagène et d'élastine, un lissage de la peau grâce à la lipolyse et au renforcement de la structure dermique pour éliminer la cellulite, et un affinement de la silhouette grâce à la réduction du tour de taille et au raffermissement des bras, de l'abdomen et des cuisses.


*Stimule la circulation sanguine et lymphatique*

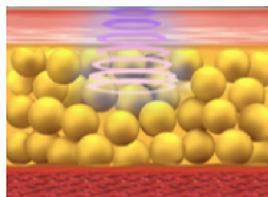


Applicateur qui est utilisé sur la zone traitée

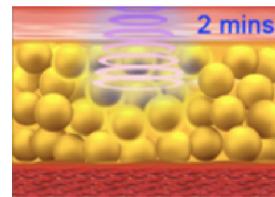

L'énergie est émise vers le tissu adipeux traité.

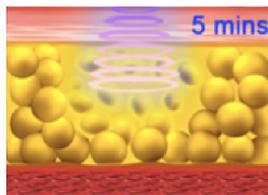

Les ondes acoustiques entraînent l'effondrement des cellules adipeuses sous-cutanées.

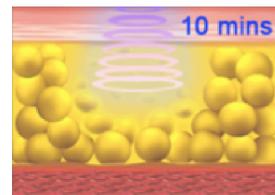

La graisse adipeuse décomposée est éliminée par le métabolisme corporel.



DISPOSITIF MÉDICAL

**NORME 2017/745 UE**  
**NORME 2014/35 UE**

# DONNÉES TECHNIQUES

*protocole*

## Caractéristiques :

- Zone ciblée : corps, visage, yeux, jambes/bras, cou/gorge, autres
- Type : équipement de beauté multi-fonctionnel et autonome
- Application : salon de beauté, spa, hôpital.
- Écran : écran tactile TFT couleur de 10 pouces
- Fréquence RF : 5 MHz
- Puissance du laser Lipo : 20 W
- Puissance RF : 150 W
- Mode de roulement : en avant et en arrière, vers le haut et vers le bas
- Efficacité supérieure : jusqu'à 42 °C en 1 minute grâce à une énergie constante délivrée par le laser Lipo de 20 W et la RF de 150 W
- Résultats : resserrement de la peau, élimination de la cellulite et réduction de la circonférence, rajeunissement cutané, élimination des rides et raffermissement



Variation de température

- +42°C

## Durée du traitement

- 10-60 minutes par séance.
- 1 fois par semaine pendant 6 à 8 semaine



## Protocole de soins possible (\*):

- 1.Évaluation initiale: effectuer une évaluation de la condition de la peau et des zones à traiter, discuter des attentes et des objectifs du patient.
- 2.Préparation de la peau: nettoyer la peau au niveaux des zones à traiter et appliquer une solution conductrice.

### Avec la Cavitation 4C

Zone de traitement : abdomen, culotte de cheval, etc

Applicateur : tête standard

Temps de traitement : 20 minutes

### Avec l'applicateur LShape

Zone de traitement : cuisses, fesses, abdomen ou dos

Mode de roulement : en avant, en arrière, vers le haut et vers le bas

Temps de traitement : 15 minutes par zone

### Avec l'applicateur MShape

Zone de traitement : flancs, mollets, bras

Mode de roulement : en avant, en arrière, vers le haut et vers le bas

Temps de traitement : 10 minutes par zone

### Avec le LiPo Laser

Zone de traitement : tout le corps

Applicateur : 8 grandes diodes, 4 petites diodes

Temps de traitement : 30 minutes

### Avec le VFace

Zone de traitement : visage, cou et décolleté

Applicateur : tête standard

Temps de traitement : 15 minutes

((\*) Il est important de noter que ce protocole est uniquement indicatif et que les réglages précis de l'appareil doivent être adaptés aux besoins et aux caractéristiques de chaque patient. Il est également essentiel que les soins soient effectués par un professionnel formé et qualifié, respectant l'utilisation d'appareils sous la norme CE MÉDICAL.

Les bonnes pratiques, la découverte des contre indications, la mise en place de protocoles adaptés et l'utilisation de la machine dans les règles de l'art, sont uniquement de la responsabilité du praticien.

Nous déclinons ainsi toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de non respect des protocoles applicables, et ne serions être tenu pour responsable des dommages ou préjudices qui pourraient en découler.

*Une machine multi-tâches. un tarif moyen de 150 euros TTC  
par séance  
La machine est financée en facturant 5 à 6 séances par mois.*



DISPOSITIF MÉDICAL

**NORME 2017/745 UE**

**NORME 2014/35 UE**

MÉDIC M ESSENTIEL  
*Médecine esthétique*



# MÉDIC M ESSENTIEL

*Contactez-nous*



[contact@medicmessentiel.com](mailto:contact@medicmessentiel.com)

06.46.41.12.74

[contact@medimessentiel.com](mailto:contact@medimessentiel.com)